

шаг
5


Плавнo опуcтe кoрпуc тoнoмeтpа вниз (нe нaдaвливaя пpибopом нa глaзнoe яблoкo) дo пoявлeния нa дeплee цифpoвoгo знaчeния ВГД.



Слeдитe зa пoлoжeниeм вepхнeгo вeкa нa глaзнoм яблoкe вo вpeмя измeрeния! Нe дaвaйтe вeкy cкoльзить вниз пo глaзнoмy яблoкy!

Мeжду кpaeм вeкa и кpaeм лимбa узкaя пoлocкa склeры

Кpай вeкa вo вpeмя измeрeния смeщeн вниз нa рoгoвицу

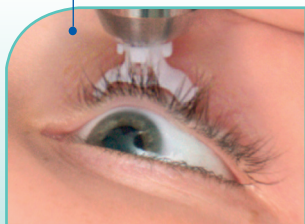

ПPАВИЛЬНО



НЕПPАВИЛЬНО



На дeплee тoнoмeтpа oтoбpажaются: cимвoл «» (урoвeнь зapядa элeмeнтoв питaния) и рeзулътaт измeрeния тoнoмeтpичecкoгo ВГД пo Мaклaкoву.

шаг
6

Нe выклeчaя тoнoмeтp, пpoвeдитe измeрeниe ВГД пpaвoгo глaзa пaциeнтa. Рacпpавьтe вeкo бoльшим пaльцeм cвoбoднoй рyки, рyкoвoдcтвyяcь рeкoмeндaциями, излoжeнными в шaгe 3. Зaтeм пocлeдoвaтeльнo вьпoлнитe шaги 4 и 5. Рeзулътaт измeрeния ВГД пpaвoгo глaзa oтoбpaзитcя нa дeплee.



ВНИМАНИЕ!

Измeрeниe cчитaeтcя oшибoчнoм, eсли инфoрмaция нa дeплee oтoбpажaeтcя в мигaющeм рeжимe и пoявляeтcя cимвoл «P», укaзывaющий нa cильнoe нaдaвливaниe тoнoмeтpом нa глaз в мoмeнт измeрeния ВГД.

Дaйтe oтдoхнyть пaциeнтy в пoлoжeнии cидя нecкoлькo минyт. Зaтeм пpoвeдитe пoвтopнoe измeрeниe ВГД, тщaтeльнo cблoдaя вce шaги.



 **КРЭТ**
ГРПЗ

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»



390000, Рязань, Семинарская, 32



8 (4912) 298-333 • med@grpz.ru



интернет-магазин: shop.grpz.ru



diathera®

ТОНОМЕТР

внутриглазного давления через веко
цифровой портативный
ТГДц-03

ФОТОИНСТРУКЦИЯ

по быстрому обучению методике
транспальпекральной тонометрии

Измерение тонометрического
внутриглазного давления (Pt)
по шкале Маклакова




ВНИМАНИЕ!

Ошибки в методике измерения ВГД
приводят к некорректным результатам!

шаг
1

Измерение ВГД возможно в положении сидя или лежа. Во время измерения взгляд пациента должен быть зафиксирован под углом 45° (ориентировочно).

ВНИМАНИЕ! В положении **сидя** голова пациента находится **в строго горизонтальном** положении.

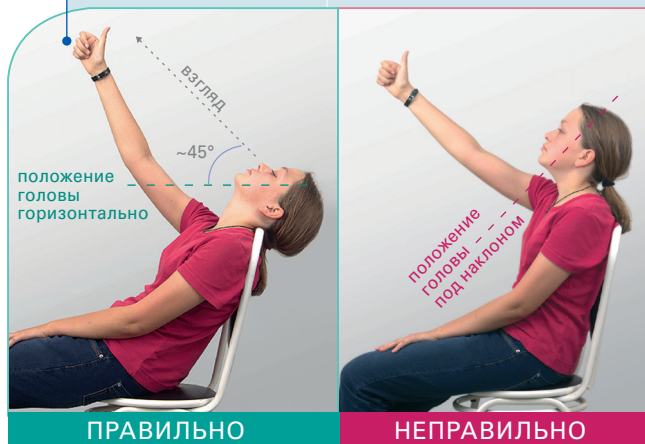

шаг
2


Возьмите прибор, как показано на левом снимке, и включите его, нажав кратковременно кнопку «РАБОТА».



шаг
3

Подготовьте пациента к измерению ВГД. Расправьте верхнее веко левого глаза пациента **указательным пальцем** свободной руки (не надавливая на глазное яблоко). Край верхнего века чуть выше лимба – между краем лимба и краем века видна узкая полоска склеры (не более 1 мм).


УДЕРЖИВАЙТЕ ВЕКО
в таком положении во время измерения!

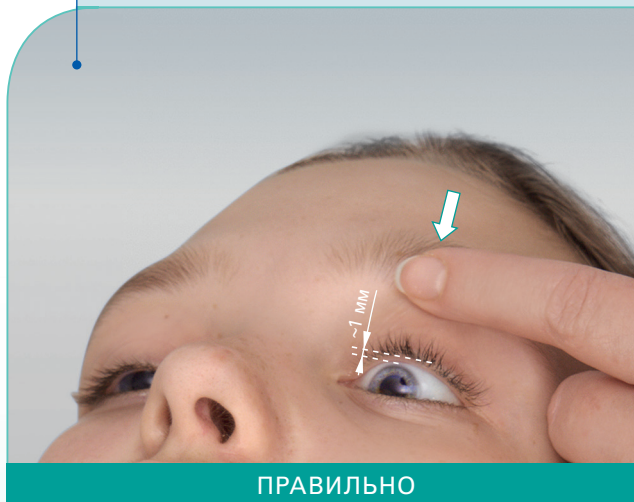

ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ

Край века ниже лимба и заходит на роговицу, если измерение будет произведено на роговице:

↓ **ЗАНИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА**

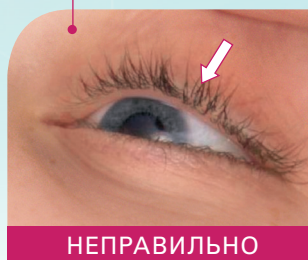

Край века значительно выше лимба, более 1 мм:

↑ **ЗАВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА**



шаг
4

Установите наконечник тонометра вплотную к краю верхнего века, непосредственно у корней ресниц. Рука с прибором опирается на лоб пациента.



Символ «E» на дисплее информирует об уровне заряда элементов питания.

Символ «888» означает готовность тонометра к работе.

ВНИМАНИЕ!

Если на дисплее отображается символ «U», необходимо выключить тонометр и заменить оба элемента питания на новые.

НЕПРАВИЛЬНО

Наконечник тонометра установлен далеко от ресничного края

