

# ФОТОИНСТРУКЦИЯ

## ПО БЫСТРОМУ ОБУЧЕНИЮ МЕТОДИКЕ ТРАСПАЛЬПЕБРАЛЬНОЙ ТОНОМЕТРИИ


**шаг 1** Пациент занимает положение сидя или лежа. Голова пациента располагается **строго горизонтально**. Взгляд зафиксирован под углом  $\sim 45^\circ$ .



**шаг 2** Возьмите прибор как показано на левом снимке и включите его, нажав кратковременно кнопку «РАБОТА».



**шаг 3** Аккуратно, **не надавливая** на глазное яблоко, расправьте и удерживайте верхнее веко пациента пальцем свободной руки так, чтобы между краем лимба и краем века была видна узкая полоска склеры (не более 1 мм).

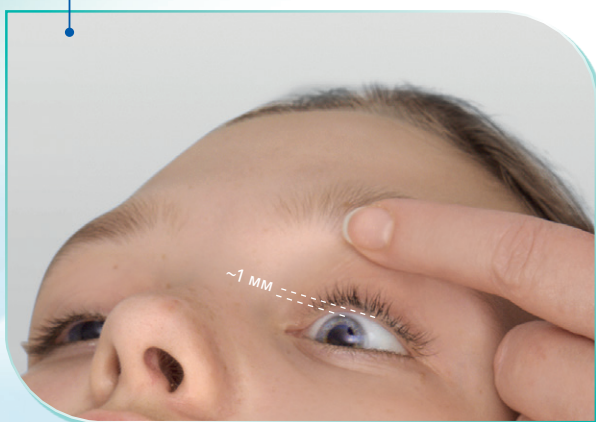

**шаг 4** Установите наконечник прибора вплотную к краю верхнего века, непосредственно у корней ресниц. Рука с прибором опирается на лоб пациента.



**шаг 5** Удерживайте прибор в **вертикальном положении**. Плавно опустите корпус прибора (не надавливая на глазное яблоко) и дождитесь показаний на экране.



**шаг 6** Измерьте ВГД другого глаза пациента, расправив веко большим пальцем свободной руки, последовательно выполняя все шаги.


Тонометр ТГДц-01	Индикатор ИГД-02	Тонометр ТГДц-03	Индикатор ИГД-03
Измеряет истинное ВГД (по Гольдману)	Измеряет тонометрическое ВГД (по Маклакову)	Измеряет тонометрическое ВГД (по Маклакову)	Измеряет тонометрическое ВГД (по Маклакову)
Отображает значение ВГД	Отображает значение ВГД и оценку результата	Отображает значение ВГД	Отображает значение ВГД и оценку результата
Серия измерений	Серия измерений	Однократное измерение	Однократное измерение
Звуковая индикация при отклонении от вертикали	Звуковая индикация при отклонении от вертикали	Незначительное отклонение от вертикали не влияет на достоверность результатов	Незначительное отклонение от вертикали не влияет на достоверность результатов

## ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРАСПАЛЬПЕБРАЛЬНОЙ ТОНОМЕТРИИ




Голова пациента не в горизонтальном положении

↓ ЗАНИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

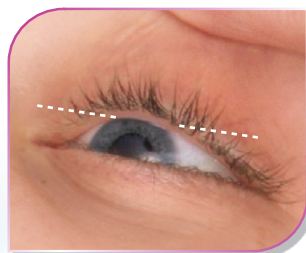


Веко заходит на роговицу

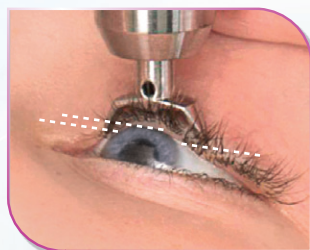


Край века во время измерения смещен в зону роговицы

↑ ЗАВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

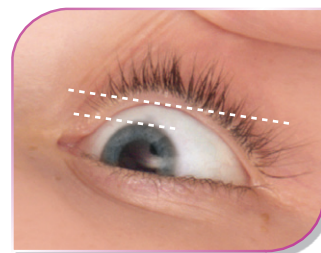

Веко значительно выше края роговицы

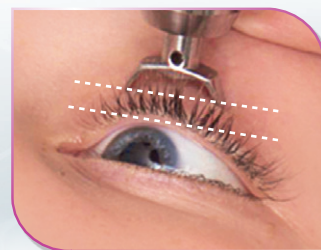

Наконечник прибора значительно выше ресничного края

